

Quick Filler **FLEX**


クイック

フィラー

フレックス

清潔なシリンジだけを持ち、連続充填！

デザイン保護委託済み

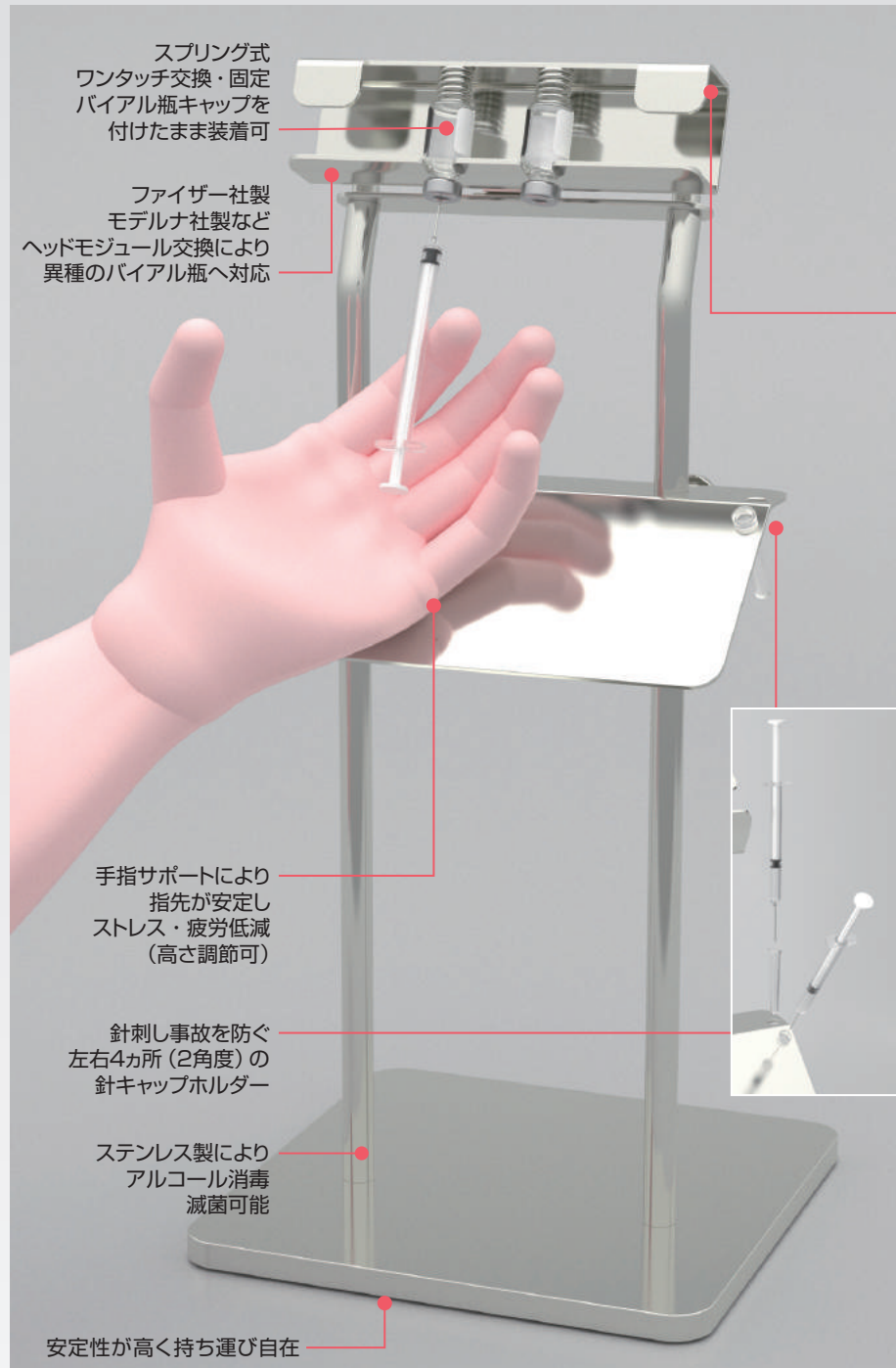

スプリング式
ワンタッチ交換・固定
バイアル瓶キャップを
付けたまま装着可

ファイザー社製
モデルナ社製など
ヘッドモジュール交換により
異種のバイアル瓶へ対応

手指サポートにより
指先が安定し
ストレス・疲労低減
(高さ調節可)

針刺し事故を防ぐ
左右4ヵ所(2角度)の
針キャップホルダー

ステンレス製により
アルコール消毒
滅菌可能


安定性が高く持ち運び自在

針先が指に向かわない

バイアル瓶を温めない

高度な手技を必要としないため、
人材確保・持ち回りの幅が拡大

最適な瓶角度への調節により、
泡沫の解消がしやすく
ゴム栓への重複穿刺を防ぎやすい

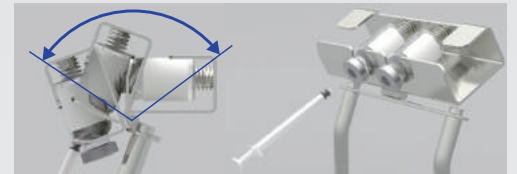

ファイザーでは
0.3ml×7本充填可

3回目モデルナでは
0.25ml×20本充填可

既設の導入現場で
検証・確認済み
(要ローデッドシリンジ)

会議机(高70cm)使用

仕様

本体寸法	W200×H420×D200
材質	SUS304
重量	5.5kg

プレスリリース



商品規格

品名	入数	型式	JANコード
クイックフィラーフレックス ファイザー	1式	QFF-P2-1	4589413370697
クイックフィラーフレックス モデルナ	1式	QFF-M2-1	4589413370703
QFフレックス交換パーツ ファイザー	1式	QFF-P2-P1	4589413370711
QFフレックス交換パーツ モデルナ	1式	QFF-M2-P1	4589413370727

交換パーツは従来型のホルダー部をフレックスタイプに出来ます(工具付)



職域接種・個別接種・集団接種ご担当の皆様へ

新型コロナワクチン接種につきましては施策推進、ご努力に感謝申し上げます。

医療機器メーカーである弊社は、ワクチン接種の現場を支える医療スタッフ様を支援し、誰でも、より確実・安全で、清潔、スムーズにワクチン接種を進めていただけますよう、長年の実績・評価をいただいている「薬液容器ホルダー」の設計を基に、バイアル瓶ホルダー「Quick Filler FLEX」を開発いたしました。

医療スタッフ様の安全性・効率性・作業の確実性を向上できます。


様々な集団接種、大規模集団接種、職域接種、個別接種会場で導入いただいております。*

ファイザー製・モデルナ製ともにそれぞれの対応器を開発済みです。

『助かっています!』
お声をいただいています

※富士通株、東京海上日動火災保険株、ブラザー工業、関東ITソフトウェア健康保険組合、横浜中工務店、株式会社エルネストコミュニケーションズ、高松国税局、広島国税局、京都府、金沢健康福祉財団(石川県) 新潟市大規模接種会場、上川町(北海道)、能代市(秋田県)、大崎市(宮城県)、久慈市 奥州市(岩手県)、邑楽町(群馬県)、五泉市(新潟県)、幸手市(埼玉県)、小牧市(愛知県)、監里病院(徳島県)、川崎町(福岡県)、栗国村(沖縄県)、大分市保健所(大分県)、坂東市(茨城県)、石川県立中央病院(石川県)、笠置町、相模郡南山村、精華町、木津川市(京都府) 敬称略

本機購入費用をワクチン接種にかかわる経費として算入が可能である旨は内閣官房大臣室に確認済みです。

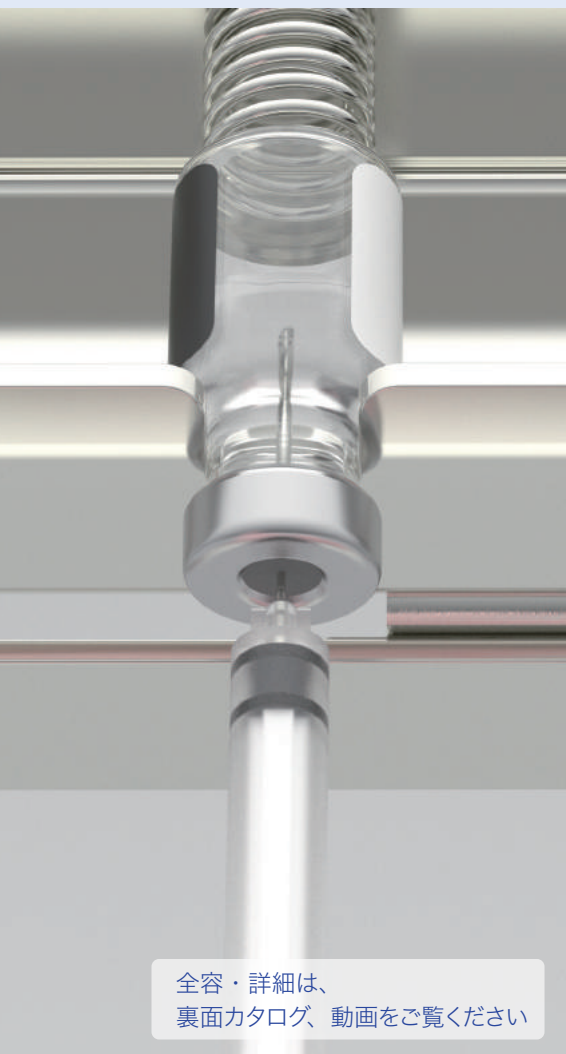

全容・詳細は、
裏面カタログ、動画をご覧ください

COVID-19 ワクチン対応

Quick Filler FLEX
クイック フィラー フレックス

- シリンジのみを両手で持つことで、計量操作が容易で確実、**分注作業のストレス・疲労を軽減・改善**します。
- 瓶とシリンジを同時に持つ手技を必要としないため、分注作業の安全性、効率・スピードが上がり、接種現場の**人的ローテーションを容易**にします。
- 下部に薬剤が集まり0.25ml×20本採取も**短時間**で行えます。ワクチン準備数と接種者数の偶発的不一致の解消、ゴム栓への重複穿刺防止など、**会場運営が安定化**します。(希釈済みファイザーワクチンは粘ちょう性があります)
- 瓶のセットによる手順の見える化が、**ミス低減**に繋がります。

従来型のクイックフィラー6瓶タイプのスタンド支柱は互換モジュール設計です。
クイックフィラー フレックスのヘッド部分のみをご購入いただき、交換可能です。

紹介動画



事例動画



ご予約、価格、納期、
試用貸出等の
お問い合わせフォーム



三田理化メディカル株式会社は創業以来
医療従事者のサポートや患者 QOL の向上を目指し
医療現場における様々な課題を
アイデアと工夫で解決する商品開発を進めています

RACoon Medical

三田理化メディカル株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷 2-17-13-102

千種潤也 (ちぐさじゅんや)

TEL 03-3812-5394 FAX 045-301-8605

mail jchigusa@racoon-medical.co.jp